


FICHE DE DONNÉES TECHNIQUES

CORGRIP*
Système AVANOS* CORGRIP* de rétention pour sonde



DESCRIPTION DU PRODUIT

Ce système AVANOS* CORGRIP* de rétention pour sonde nasogastrique/nasointestinale (NG/NI) est un accessoire conçu afin de prévenir le déplacement ou le retrait indésirable des sondes NG/NI chez les patients adultes.
Avertissement : Ne convient pas pour un usage

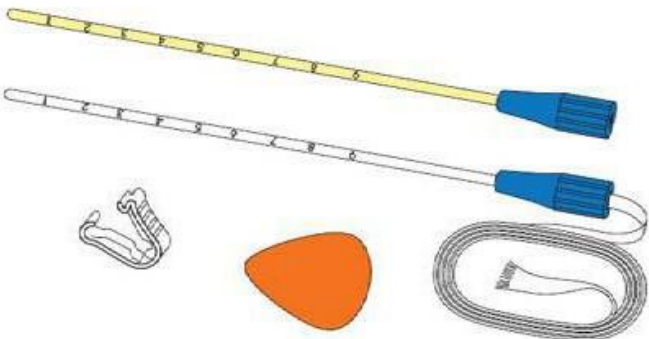

CARACTÉRISTIQUES

- Clamp SSL* (Slot-Slide-Lock) facile à utiliser avec graduation française
- Marquages en centimètres sur les deux cathéters pour une insertion en toute sécurité
- Ruban ombilical en polyester biocompatible de longue durée
- Recommandé jusqu'à 4 semaines d'utilisation continue

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Le système AVANOS* CORGRIP* de rétention pour sonde d'alimentation nasogastrique/nasointestinale (NG/NI) est indiqué pour une utilisation avec des sondes d'alimentation entérale AVANOS* de 8 FR et supérieures afin de prévenir le déplacement ou le retrait accidentel des sondes chez les patients adultes.

CONTRE-INDICATIONS D'UTILISATION

Le système CORGRIP* est contre-indiqué chez les patients présentant des fractures faciales et/ou crâniennes, des anomalies ou une obstruction des voies respiratoires nasales. Il ne devrait également pas être utilisé chez les patients pouvant tirer sur leur sonde

SSL* Clamp Color Reference Guide			SSL* Clamp Color Reference Guide		
14 FR	YELLOW*		8 FR	Pale Blue	
	Jaune			Blue clair	
	Gelb			Hellblau	
	Amarillo			Celeste	
	Giallo			Celeste	
16 FR	Orange		10 FR	Pink	
	Orange			Rose	
	Gelb			Rosa	
	Amarillo			Rosa	
	Arancione			Rosa	
18 FR	Tan		12 FR	White	
	Hayane			Blanc	
	Hellbraun			Weiß	
	Tostado			Bianco	
	Marrone chiaro			Bianco	
	Lichtbrun			Wit	
	Beige			Vit	

DESTINÉ À UN SEUL PATIENT

STÉRILISATION

d'alimentation ou sur le système de rétention pour sonde d'alimentation NG/NI AVANOS* CORGRIP* .

Produit non stérile

au point de s'infliger de graves _____
blessures. Si la condition médicale ou l'état
mental d'un patient laisse supposer que celui-
ci pourrait tirer en permanence sur la sonde
d'alimentation ou sur le système CORGRIP*, il
est recommandé d'immobiliser la sonde
d'alimentation d'une autre façon, afin de
minimiser les risques de lésion éventuelle ou
de déplacement de la sonde.

DURÉE DE CONSERVATION

5 ans à compter de la date de fabrication

FABRICATION

Pas de PO sur l'étiquette

COMPOSITION

Cathéters : matériau PEBA
Clamp : polypropylène Plectre
: Delrin
Ruban ombilical en polyester biocompatible
de longue durée
Fourni avec du lubrifiant hydrosoluble



CONDITIONNEMENT

Quantité des UNITÉS DE VENTE	10
Taille (pouces) (DE) :	10,750 (L) x
	5,750 (I) x
	3,625 (p)
Boîtier en pieds cubes :	0,130 (pieds³)
Taille (mm) (DE) :	273,050 (L) x
	146,050 (I) x
	92,075 (p)
Boîtier en mètres cubes :	0,004 (m³)
Poids du boîtier :	1,21 (lb)
Modèle d'empilage :	RB28E28
Boîtiers/Couche :	28
Couches/Unité de palette OR :	28
Boîtiers/Unité de palette OR :	784

CODE-BARRES/CODE UNIVERSEL DE PRODUIT

Type : GS1-128

Code	Code-barres EAN	Code-barres EAN
25-008	00350770458359	10350770458356
25-010	00350770458366	10350770458363
25-012	00350770458373	10350770458370
25-014	00350770469034	10350770469031
25-016	00350770469041	10350770469048
25-018	00350770469058	10350770469055

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

- Numéro du certificat CE : CE 711145
- Organisme notifié BSI (2797)
- Classe IIa

LANGUES

Produit	Langues
CORGRIP	EN, FR, ES, DE, IT, NL, SV

Dernière mise à jour : nov
2020